

Türkçe

Clearblue DIGITAL

(Clearblue, adetinizin başladığı günden itibaren 49 gün içerisinde doğruluk oranına sahiptir)
Clearblue, adetinizi takip eder ve hamilelikte kullanılmamalıdır.
Lütfen testi yapmadan önce bu broşürü dikkatle okuyun.

GEBELİK TESTİ

1 Testin Yapılışı

Testi adetinizin başladığı günden itibaren yapıyorsanız, günün her saati yapabilirsiniz. Daha önce yapıyorsanız, test için günün ilk kavrını kullanın.

- Teste hazır olduğunuzda Test Çubuğunu folyo kılıfından alın ve mavi başlığını çıkarın. Test Çubuğunu hemen kullanın.
- Test işlemi boyunca, Emici Filtre içeren Test Çubuğunu kesinlikle yıkanarak bakacak şekilde tutmayın.

YÖNTEM

Testi akan idrarda gerçekleştirin

- Sadece Emici Filtre yalnızca 5 saniye boyunca aşağı bakacak şekilde akan idrarda tutun.
- Test Çubuğunun kalan kısmının istanmamamasına dikkat edin.
- Başlığı yerine takarak Test Çubuğunu yatay biçimde bir yere koyun.

YÖNTEM

Testi temiz, kuru bir kaba idrardan örnek alın

- Emici Filtre, şekilde gösterildiği gibi, yalnızca 20 saniye boyunca, aşağı bakacak şekilde idrarda tutun.
- Başlığı yerine takarak Test Çubuğunu yatay biçimde bir yere koyun.

2 Bekleyin...

- Bekleyin sembolü testin yapıldığını göstermek için yanıp söner.
- Bekleyin sembolünün yanıp sönmeye durduğunda sonucunuz görüntülenir. Testi yaptıktan sonra Wait sembolü görünmezse, arka sayfadaki Sorular ve Cevaplar bölümünde 5. soruya bakın.

3 Sonucunuza bakın

- Sonucunuz 3 dakika içinde ekranda görüntülenir.
- Bazı sonuçlar 1 dakika kadar kısa bir sürede görüntülenebilir.
- Sonucunuz yaklaşık 24 saat boyunca ekranda kalır.



5 SANIYE

Emici Filtre

clearblue

20 SANIYE



Başlık

Hamile

Sonucunuz 'Hamile' ise, Sorular ve Cevaplar bölümündeki 7. soruya bakın

Hamile Değil

Sonucunuz 'Hamile Değil' ise, Sorular ve Cevaplar bölümündeki 8. soruya bakın

Sorular ve Cevaplar - Lütfen arka sayfadaki en sık sorulan soruların yanıtlandığı bölümü okuyun.

Testi Hataları - Test Çubuğunu kullanırken ve ekranı izlerken aşağıdaki hataları gözlemliyorsanız, Lütfen arka sayfada Test Hataları bölümünü okuyun.

Clearblue Dijital Gebelik Testininizle Atılmaması

• Testinizi atmadan önce, Test Çubuğundaki pilleri çıkarın. Test Çubuğunun arkasındaki yuvaya bir madeni para yerleştirin. Plastik çarşori toruğa atın.

• Pili çıkarın ve uygun geri dönüşüm planına göre atın. Üstteki Pili çıkarılmayın, yerinde sağ işlemi veya atılmayın. Yutmayın. Çocuklardan uzak tutun.

• Test Çubuğunun geri kalan kısmını, elektrikli ekipmanlara uygun geri dönüşüm planına göre atın.

• Elektrikli ekipmanları atmayın.

Sorular ve Cevaplar

1. Clearblue Dijital Gebelik Testi ne hesleir diğeri?
Laboratuvar testlerinde, adetinizin başladığı günden itibaren kullanıldığında, Clearblue Dijital Gebelik Testi'nin %99'un üzerinde doğrulukla sahip olduğu ortaya konmuştur.

2. Clearblue Dijital Gebelik Testi nasıl çalışır?
Hamile kediğinizde vücudunuz hCG (human Chorionic Gonadotropin - insan koryonik gonadotropin) salgılayarak, idrarda hCG miktarını artırır. Hamilelik ilk dönemlerinde görür. Clearblue idrarda hCG hormonunu çok küçük miktarda tespit edebilir. Clearblue Dijital Gebelik Testi'nin hassasiyeti 25 mIU/ml'dir.

3. Clearblue Dijital Gebelik Testiyle ne zaman test yapabilirsiniz?
Clearblue Dijital Gebelik Testi adetinizin başlamasından 4 gün öncesine kadar kullanılabilir. Adetiniz başlamadan önce test yaparsanız ve 'Hamile Değil' sonucu alırsanız, yine de hamile olma ihtimaliniz vardır. Hamileliğin ilk dönemlerinde örnekteki Clearblue ile yapılan ilknk testleri sonuçları için aşağıdaki grafiğe bakın.

Erken Test

Clearblue, testi adetiniz başlamadan yaparsanız önerir. Bununla birlikte, gebelik hormonu hamileliğin ilk döneminde hızla artar ve adetinizin başlamasından 4 gün öncesine kadar Clearblue ile test yapılabilir. Hamileliğin ilk dönemlerinde örnekteki Clearblue ile yapılan ilknk testlerde Clearblue Dijital Gebelik Testi aşağıdaki sonuçları verir:

Adet başlamadan önceki gün sayısı	'Hamile' sonucu veren hamile kadınlardan alınan örnek yüzdesi
-1	93%
-2	96%
-3	92%
-4	91%

• Adetinizle ne zaman başlayacağınıza yaparsanız için, adetinizin ilk gününde başlayıp sonraki adetinizin başlamasından bir gün öncesine kadar olan gün sayısını sayarak normal adet döngünüzü belirleyebilirsiniz.

- Düzensiz adet görüyorsanız, test işleminden önce son ayda geçirdiğiniz en uzun döngüye göre sonuç alınmalıdır.
- Adetinizin ne zaman başlayacağı konusunda bir beliriz yotas, en son konumunuz bilginize geçirdiğiniz tarihten 18 gün sonrasına kadar test yaparsanız öneririz.
- Testi adetinizin başladığı günden sonra yapıyorsanız, günün her saati yapabilirsiniz. Daha önce yapıyorsanız, test için günün ilk kavrını kullanın. Testten önce aşırı sıvı almaktan kaçının.
- Test sonucu 'Hamile Değil' ise ve halen hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, 8. soruya bakın.

4. Hamileliği bir ilac veya tabii olarak sonucu etkileyebilir mi?
Testi yapmadan önce, kullandığınız her türlü ilacı ilacı olarak her zaman Özetinin listelenmesini okuyun.

• hCG içeren feritile baştan hatalı sonuçlar verir (feritile baştan penetrilite enjeksiyonları verir ve uygulandıktan kısa süre sonra yapılacak bir test hatalı şekilde 'Hamile' sonucu verir).

• Diğer feritile tedavilerinin (döngüden sırtı gibi), ağır kasıcılar ve hormonal gebelik önleyici ilaçların (örn. gebelik önleyici hepi) sonucu etkilemez.

• Hormonal gebelik önleyici ilaç kullanmayı yakan zaman içinde bırakırsanız veya idrarda sırtı gibi feritile tedavileri görürsünüz, adetinizin düzenli olabilir ve testi erken yaparsanız yol açabilir.

• Yakin zamanda hamilelik geçiriyorsanız (hamileliği tamamlanmamış olsanız da) hatalı şekilde 'Hamile' sonucu alabilirsiniz.

• Göğüs hassaslığı, onayın bitmesi, menopoz ve çok nadir görülen bazı tıbbi durumlar da hatalı sonuçlar verebilir.

• 'Hamile' sonucunu alırsanız, hamileliğin ilk safhalarında oluşabilecek diğer küçük nedensizler daha sonra hamile olmadığınız görürsünüz, adetinizin düzenli olabilir ve testi erken yaparsanız yol açabilir.

5. Testi kullanmadan önceki Wait sembolü görüntülenmedi. Bunun anlamı nedir?
Testi kullanmadan önceki Wait sembolü görüntülenmedi. Bunun anlamı nedir? Testi kullanmadan önceki Wait sembolü görüntülenmedi. Bunun anlamı nedir?

6. Testi kullanmadan önceki Wait sembolü görüntülenmedi. Bunun anlamı nedir?
Testi kullanmadan önceki Wait sembolü görüntülenmedi. Bunun anlamı nedir?

7. Test sonucu 'Hamile' olduğunu bildiriyor. Ne yapmalıyım?
Test sonucunuz 'Hamile' ise, bundan sonra hangi adımları izleyeceğinizi konusunda öneriler bulunması için doktorunuza görünmelisiniz.

8. Test sonucu 'Hamile Değil' sonucunu veriyor. Ne yapmalıyım?
Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, gebelik hormonu ölçmeyi hedefli bir test yapın. Sonuçta hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, adetinizin başladığı zaman tekrar test yapın.

• Adetiniz geçmiyorsa, 3 gün içinde test yeniden yapın. Bu test de 'Hamile Değil' sonucu verirse ve halen adet görmediyseniz, doktorunuza başvurun.

Test Hataları

• Kuyruklu testin test sonucunda bir hata oluştu.
Aşağıdaki hataları bir okuyun olabilir:

- Emici Filtre aşağı doğru kullandıysanız veya idrar uygulandıktan sonra Test yatağı biçimde yere bırakılmadıysa.
- Çok fazla veya çok az idrar uygulandıysa.
- Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.
- Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.

• Çok fazla veya çok az idrar uygulandıysa.
• Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.
• Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.

• Çok fazla veya çok az idrar uygulandıysa.
• Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.
• Test Çubuğunu bir süre kullanmadıysanız.

Hamileliği bir ilacı diğer edenler, ilaçlar ve genel öneriler için aşağıdaki adresleri ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

www.Clearblue.info

Bu cihaz evde kullanılmak için tasarlanmıştır. Sadece in vitro (dışarıya veya başka yapıları) ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Oda sıcaklığında saklayın. Çocukların erişiminden uzak tutun. Test Çubuğunu bir süre kullanmayın. Folyo kılıfını geri dönüşüm test kullanmayın. Bu kılıfın her iki tarafını da kullanmayın. Bu talimatlar, model no. 505800 için.

CE

0843

Clearblue Dijital Gebelik Testi aşağıdaki elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Clearblue Dijital Gebelik Testi'nin etkinliği, testin bu tür ortamlarda kullanılmasıyla azalabilir. Bu ürün EN60921-1-2:2002'ye göre test edilmiştir.

Testi	Uygunluk Grubu	Elektromanyetik Ortam - Kilitlenmez	Testi	Uygunluk Grubu	Elektromanyetik Ortam - Kilitlenmez
RF emeyorları CISPR 11	Grup 1	Clearblue Dijital Gebelik Testi RF emeyorları yalnızca dışarı çıkartıcı için kullanılır. Bu nedenle RF emeyorları çok güçlü ve çevresinde elektronik ekipmanlar bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.	Elektrostatik bozulma IEC61000-4-2	2kV temas 2kV hava	Zemin bağlantı matrisiyle kaplıysa, bağlı nem en az %30 olabilir.
RF emeyorları CISPR 11	B Sınıf	Clearblue Dijital Gebelik Testi, iç mekanlar dışarı çıkartıcı olarak her türlü mekanda kullanılabilir.	Yaygın RF IEC61000-4-3/4	3V/m (30MHz - 2.5 GHz arası)	d = 1.2-7P, 80 MHz - 800 MHz arası d = 2.3-7P, 800 MHz - 2.5 GHz arası burada P test cihazı ölçtükten sonra maksimum güç değeri, d ile ilgili olarak istatistiksel olarak ayarlanmalıdır.

NOT a). Bu yönergeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapıldığında, cihazlardan ve insanlardan gelen emilim ve yansımalar etkileyebilir.